

HYGIENA PUMPY FLOCARE[®] INFINITY

JAK ČISTIT PUMPU?

- 1) Postupujte vždy v souladu s návodem na použití
- 2) Odpojte pumpu od elektrické sítě
- 4) Očistěte všechny povrchové části pumpy (včetně senzoru a rotoru) teplou vodou a mýdlem.
- 5) Pokud je potřeba očistit adaptér, odpojte jej od elektrické sítě a očistěte pomocí suchého nebo lehce navhčeného hadříku.

VĚDĚLI
JSTE, ŽE PUMPU
INFINITY MŮŽETE
OMÝVAT POD
PROUDEM
VODY?



VHODNÉ DEZINFEKČNÍ LÁTKY



- ✓ Roztok peroxidu vodíku (max. 5% roztok)
- ✓ Roztok chlornanu sondého (SAVO, max. 5% roztok)
- ✓ 70% Isopropyl Alkohol (jen krátkodobě, mimo display)



UPOZORNĚNÍ

- Neponořujte pumpu do vody.
- Pumpa není určena ke sterilizaci.
- Nepoužívejte abraziva, agresivní čistící/ dezinfekční látky (jód, benzen, aceton)

www.flocare.cz

Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost
– není určen pro pacienty ani širokou veřejnost.

